



UPZir[®] Clean
氧化锆修复体口外清洁剂

深圳爱尔创数字口腔有限公司
Shenzhen Upcera Digital Dental Technology Co., Ltd.
E-mail: services@upcera.com
网址: dental.upcera.com

客服热线 400-6785005



官方公众号




Reliable Materials Expert

UPZir® Clean

快速洁净 粘接无忧


UPZir®Clean氧化锆修复体口外清洁剂是一款有效去除口内试戴后氧化锆修复体表面唾液污染的强碱性糊剂，可恢复修复体粘接面的清洁，改善试戴后修复体表面的粘接效果。

- 独有分散珠设计，混合更均匀，操作更简单；
- 独特配方设计，清洁效率高，粘接强度恢复明显；
- 红色糊剂，易清洁，无表面残留；

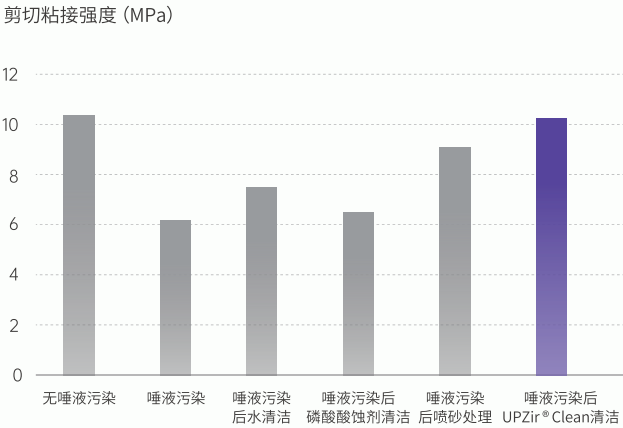

*数据来自爱尔创研发中心 *依据YY0518-2009标准进行试件的剪切强度测试

操作步骤

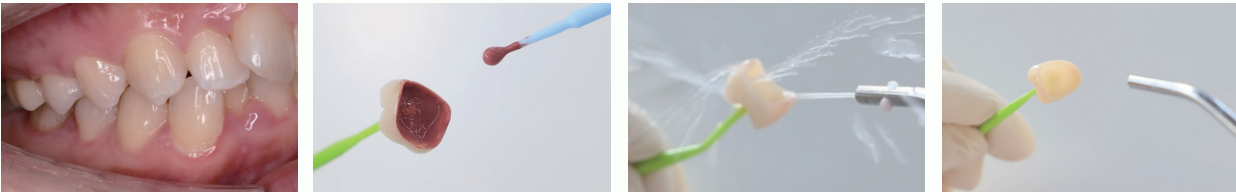


口内试戴 涂布UPZir®Clean, 保持20-30秒 冲水 无油空气吹干

UPZir® Clean作用机理

口内试戴过程中，氧化锆修复体粘接界面与唾液等污染物接触，导致界面污染。若粘接前不能有效去除污染，将影响粘接系统与氧化锆修复体之间的结合，进而降低其粘接强度，增加微渗漏、继发龋甚至修复体脱落等不良反应发生的风险。粘接界面的清洁，已成为氧化锆修复体长期稳定粘接的重要因素之一。

UPZir® Clean 凭借强碱性和金属氧化物颗粒吸附作用的双重加持，为修复体的粘接效果提供良好的保证。

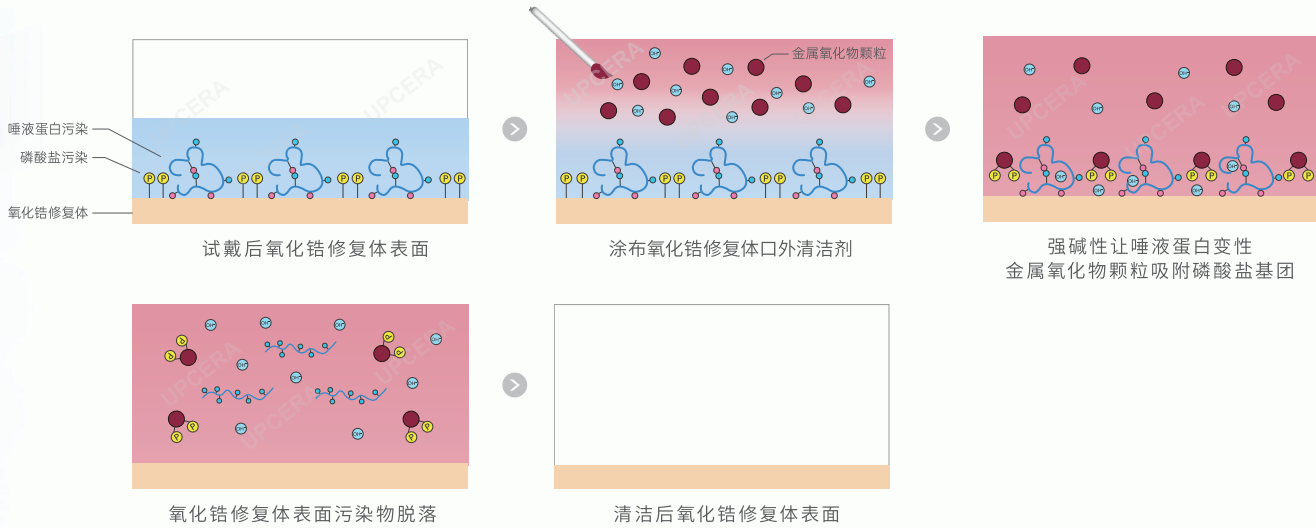

扫码反馈更多
产品使用建议